


移乗も、移送も、1人でラクラク。

NURSELUCK

ナースラック

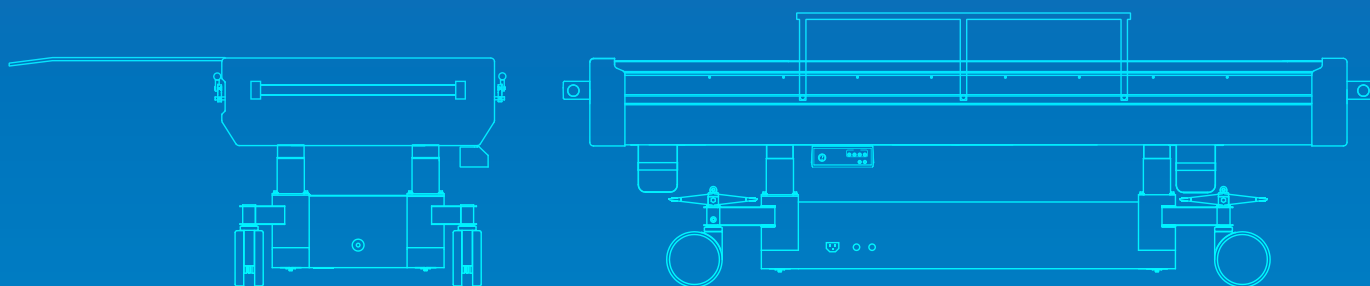

たとえば、こんな現場で・・・

特別養護
老人施設



放射線
部門



手術室



リハビリ
テーション
センター



1台2役。 ベッド移乗も、移送も、 ナースラック NURSELUCKにおまかせください。

NURSELUCKは、ボタン操作で天面ボードが横方向に伸縮。

独自の特殊構造により、患者さんに手を触れることなく、

ベッド移乗を行うことができます。

ストレッチャーとしても活用することができるため、


ベッド移乗から移送、再度ベッド移乗までを一人で行うことが可能です。



ナースラック

NURSELUCKの主な特長

人手による患者さんの移し替えで起こる、
持ち上げ・引っ張りなどによるショックがありませんので、
患者さんに苦痛を与えません。

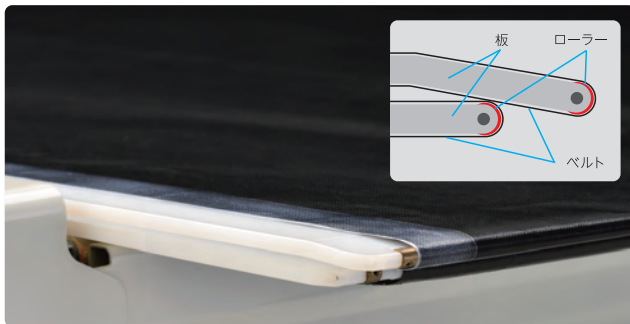

1 清潔な抗菌仕様の天面

天面は2枚のボードと、それぞれを覆う抗菌仕様のベルトで構成。どのような体型・状態の患者さんにも負担をかけることなく使用することができます。




2 使い勝手の良いリモコン

片手で操作できるコンパクトサイズ。直感的に操作できるシンプルなデザインで、ベッドの上下動、天面の伸縮・患者さんの乗せおろしが行えます。




3 キャスターは3段階切替

キャスターは、フットペダルの操作で直進・自在・静止の3モードに切り替えが可能。前2輪・後2輪を独立してモード変更することができます。

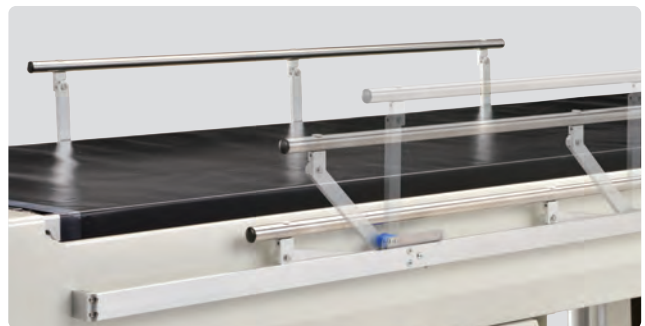

4 移動時も安全な転落防止柵

左右の柵は、折りたたみ式。簡単な操作で折りたたむことも立ち上げることができ、移送時の転落の心配もありません。

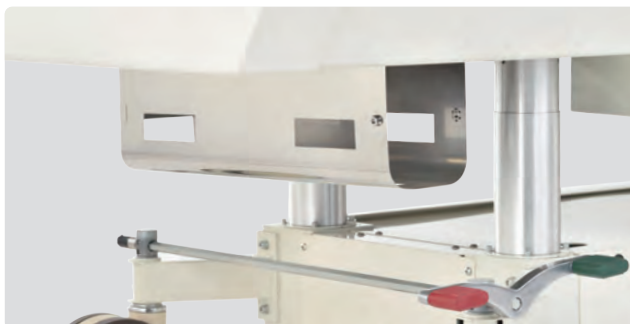

5 点滴棒・酸素ボンベラックを標準装備

点滴棒は前後4カ所、酸素ボンベは前後2カ所に取り付けが可能。患者さんの状態に合わせて取り付け場所を変えることができます。

各種・カスタマイズにも柔軟に対応

- ・ 冬場の移送は患者さんの負担になるので、ヒーター機能を付けたい
- ・ 移乗作業に合わせて体重測定も行いたい
- ・ 酸素ボンベラックの位置を変えたい

など、カスタマイズのご用命もお受けいたします。
また、オプションとして患者固定ベルトをお付けすることが可能です。詳細は、お気軽にご相談ください。


ベッド移乗の流れ

2枚合わせの天面ボードとそれを覆うベルトが独自の動きをすることにより、患者さんの衣服やシーツを巻き込むことなく、スムーズに移乗を行うことができます。




NURSELUCKに患者さんを乗せる場合

1. ③④のボタンで高さを調整したら、①のボタンで患者さんとベッドの間に天面ボードを伸ばしていきます。

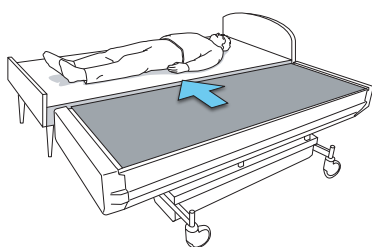


2. 天面ボードを患者さんの下に伸ばし終えたら、②のボタンで、患者さんごと天面ボードを引き戻します。

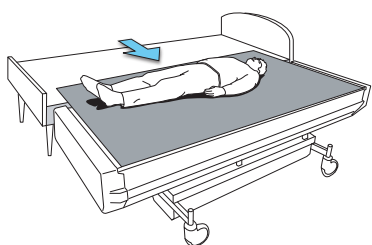


NURSELUCKから患者さんを降ろす場合

1. ③④のボタンで高さを調整したら、⑤のボタンで、患者さんごと天面ボードをベッドに伸ばしていきます。

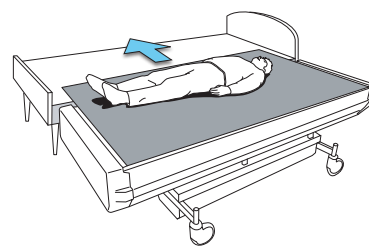

2. 患者さんをベッド中央まで動かしたら、⑥のボタンで、天面ボードだけを引き戻していきます。

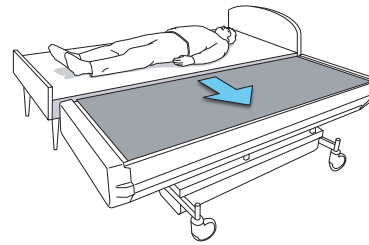

介護する側も、される側も。 負担軽減で、みんな笑顔に。

病院の救急部門や介護施設などで頻繁に行われる
ベッドの移乗作業は患者さんや要介護者さんだけでなく、
看護師・介護士にとっても大きな負担となるものです。
「NURSELUCK」を使えば、ベッド移乗を自動で完了。
場合によっては数人で行わなければならない作業が、
ボタン操作だけで、1人だけで行えます。
患者さんはもとより、看護師さん、介護士さん、
みんなにやさしい機能で、
明るく清潔な医療・介護現場の
実現に貢献します。

たとえば、 こんな現場で・・・


- ◎ 放射線部門
 - 血管撮影
 - CT スキャン
 - 放射線治療
- ◎ 救急部門
- ◎ ICU・CCU
- ◎ 手術室・リカバリー室
- ◎ 病棟部門
- ◎ 整形外科
- ◎ 特定疾患治療施設
 - 熱傷センター
皮膚移植患者のデリケートな搬送のために。
 - リハビリテーションセンター
からだの不自由な人の搬送に。
 - ガンセンター
激しい苦痛を伴う患者の搬送に。
 - 脳外・脊髄損傷センター
体位を変えることができない患者の搬送に。
- ◎ 特別養護老人施設
日々のシーツ替え・浴室への移動時などに。



仕様

型 式	T2012
最低にしたときの高さ(移送面)	650 mm（※特注による寸法指定も可能）
最高にしたときの高さ(移送面)	880 mm（※特注による寸法指定も可能）
全 長	2,192 mm
全 幅	810 mm
自 重	215 Kg
最大荷重	150 Kg
電 源	24Vバッテリー方式
充 電	100～110V (50/60Hz) で放電状態より充電まで約8時間 (10分間操作しないと自動的に電源をOFF)
キャスター	φ150 mm、4輪ブレーキ付 (直進、自在、ブレーキ切替可能)
バッテリーランプ	バッテリーの状態を知らせるランプ付
移送面	テフロンコーティング ナイロン製
オプション	患者固定ベルト その他ご希望に応じてオーダー可能ですので詳しくはお問い合わせください。
標準付属品	点滴棒×1、酸素ボンベラック×2、充電用ACコード×1

仕様等は改良等により予告なく変更されることがあります。

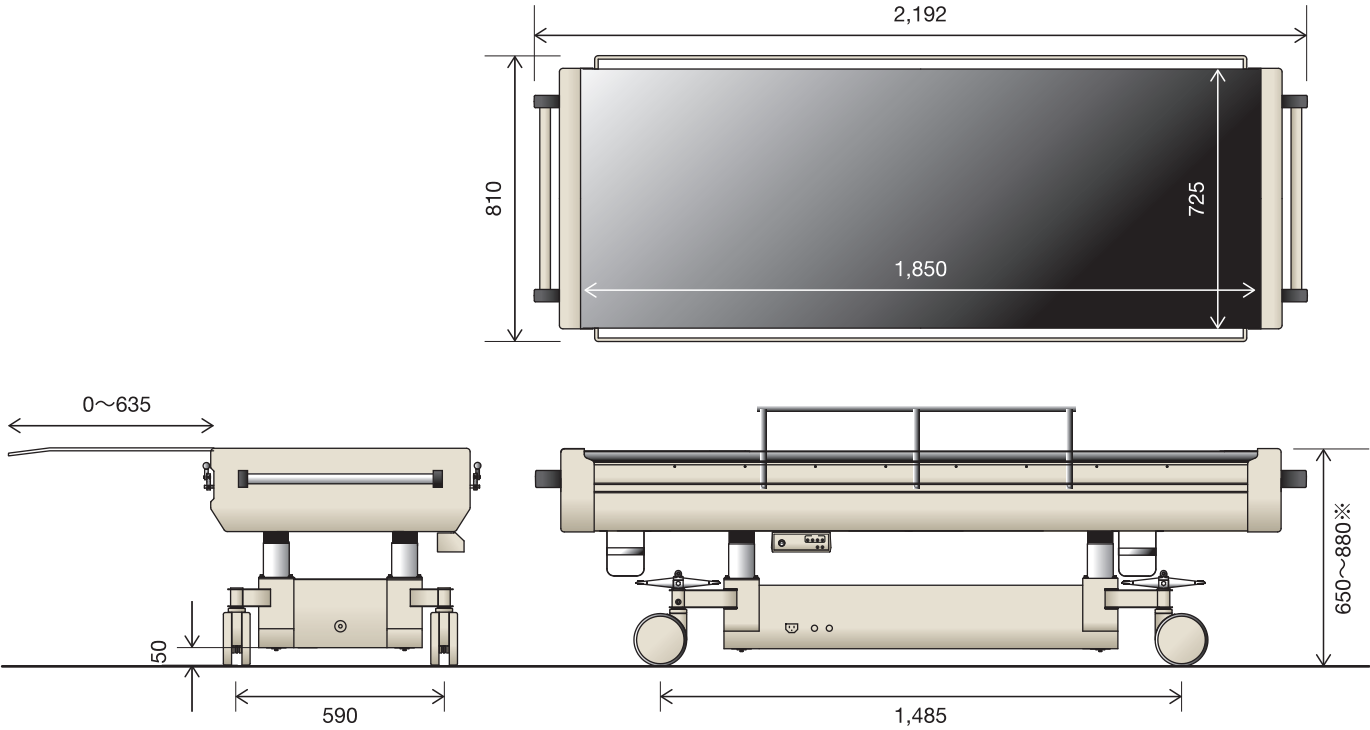

[単位は全てmm]

◎ 製品の修理・メンテナンスに関しては、下記までお願いします。

田中電気株式会社

本 社 〒606-8202 京都市左京区田中大堰町52-2
TEL.075-701-6009 FAX.075-701-6049

販売代理店